

Gebruik AED bij volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar of vanaf 25 kilo

Bel eerst 112

1. Druk op de groene aan/uit-knop (1).
2. Volg de gesproken aanwijzingen van de AED
3. Druk op de knipperende oranje schokknop (3) als daarom wordt gevraagd.



BELANGRIJK:

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de overlevingskans bij plotselinge hartstilstand direct verband houdt met de snelheid waarmee defibrillatie bij de patiënt plaatsvindt. Met elke minuut vertraging neemt de overlevingskans met ongeveer 7 % tot 10 % af.

Behandling is geen garantie voor overleven. Bij sommige patiënten kan de onderliggende oorzaak van de hartstilstand eenvoudigweg niet worden overleefd, ongeacht de beschikbare behandeling.



Heeft u de AED gebruikt meld dit altijd aan het bestuur zodat zij zorg kunnen dragen voor nieuwe elektroden

Gebruik AED bij baby's en kinderen tot 8 jaar of 25 kilo.

Bij twijfel volwassenen procedure volgen!

Bel eerst 112


1. Steek de baby-/kindersleutel in het sleutelgat middenboven op het voorpaneel van de AED (zie illustratie links). Het roze gedeelte van de sleutel draait (1) en past in het sleutelgat (2), waarbij de voorkant van de sleutel plat op de bovenkant van de AED komt te liggen en u het link onderstaande plaatje voor installatie van de baby-/kinderelektroden kunt zien.

2. Zet de AED aan en volg de mondelinge instructies op.

3. Plaats de elektroden op de borst en de rug van het kind zoals afgebeeld. Het maakt niet uit welke elektrode u op de borst plaatst en welke op de rug.

4. Druk op de knipperende oranje schokknop als daarom wordt gevraagd.

*installeer de baby-/
kindersleutel
als deze beschikbaar is.*

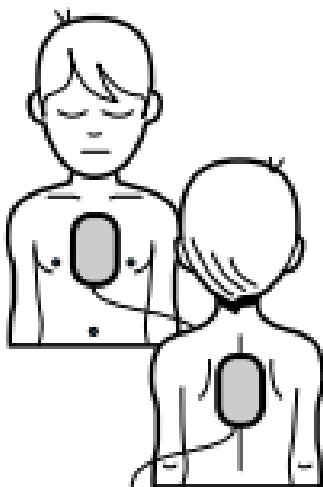

Heeft u de AED gebruikt meld dit altijd aan het bestuur zodat zij zorg kunnen dragen voor nieuwe elektroden

